


Introduzione ai posizionatori Flo-Form

Le superfici morbide contaminate (cuscini, materassi, ecc.) contribuiscono in larga misura alla diffusione delle infezioni nosocomiali (ICA), minacciando la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari. Le superfici morbide con tecnologia filtrante PneumaPure® forniscono una barriera affidabile contro la contaminazione microbica, migliorando la sicurezza negli ambienti sanitari.

Posizionatori Flo-Form caratteristiche

- La tecnologia brevettata PneumaPure® consente il passaggio dell'aria bloccando agenti patogeni come MRSA, C. diff, E. coli, coronavirus e altri ancora.
- L'esterno ermetico e impermeabile impedisce l'ingresso di agenti patogeni e rende le superfici morbide facili da pulire, senza bisogno di lavanderia.
- Il posizionatore Flo-Form® è un mezzo fluidizzato non alimentato che massimizza la modellazione e il sostegno, ridistribuisce la pressione su una superficie più ampia e favorisce un posizionamento efficace del paziente con un allineamento neutro della colonna vertebrale e degli arti.

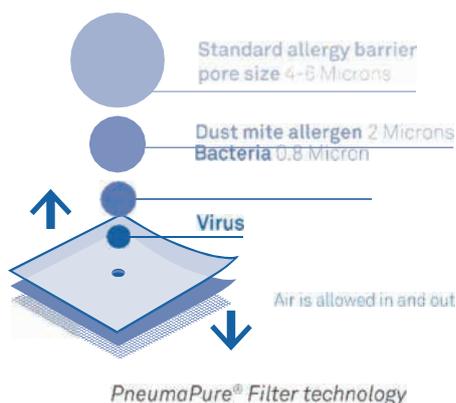

www.sleepangel-medical.com



Affrontare le seguenti questioni

Controllo delle infezioni

Movimentazione sicura dei pazienti

Prevenzione delle lesioni da pressione

Rotazione e riposizionamento del paziente

Paziente in posizione prona

Compatibilità con il microclima

Il posizionamento del paziente implica il mantenimento di un allineamento corporeo neutro, evitando l'iperestensione e la rotazione laterale estrema per prevenire le complicazioni dell'immobilità e le lesioni.

Caratteristiche del posizionatore Flo-Form

SleepAngel

I dispositivi di posizionamento fluidizzati (DPF) sono costituiti da microsferi lubrificate, che consentono di adattarsi tridimensionalmente alla forma specifica del paziente e di mantenerla fino a quando non vengono rimodellati. I dispositivi DPF possono essere utilizzati per il posizionamento di pazienti adulti e neonatali.

- Flo-Form® è un mezzo fluidizzato, progettato per massimizzare la modellazione e il supporto.
- Il posizionatore Flo-Form si modella efficacemente quando vengono applicate le normali forze del corpo.
- Ridistribuisce la pressione su una superficie più ampia
- Posiziona efficacemente i pazienti e favorisce l'allineamento neutro della colonna vertebrale e degli arti
- La tecnologia PneumaPure® e l'esterno impermeabile consentono al posizionatore di respirare bloccando l'ingresso e l'uscita di agenti patogeni.

Flo-Form è un mezzo eccellente per il posizionamento del paziente e la redistribuzione della pressione.



Posizionamento della testa



Posizionamento del corpo



Posizionamento durante lo sviluppo

Ispezione E pulizia

Disinfettare l'involucro con un disinfettante approvato dall'ospedale. Lasciare asciugare. Dopo la disinfezione, pulire con un panno pulito inumidito con acqua pulita. Lasciare asciugare completamente il posizionatore prima di utilizzarlo.

Per saperne di più sulle istruzioni dettagliate per la pulizia:



Posizionatori Flo-Form per adulti

SleepAngel®

Flo-Form è una tecnologia fluidizzata che può essere modellata in qualsiasi forma e mantiene la sua forma fino a quando non viene rimodellata. Grazie a questa caratteristica unica, Flo-Form è un mezzo eccellente per il posizionamento del paziente e la redistribuzione della pressione.



Per il posizionamento della testa

- Sostiene il collo e le spalle per scaricare l'occipite
- Protegge le orecchie, il naso e il viso dal taglio e dall'attrito
- Sostiene la colonna vertebrale cervicale
- Favorisce l'allineamento neutro della colonna vertebrale
- Facilita la gestione di tubi e linee



Per il posizionamento del corpo

- Contorna e sostiene il corpo per scaricare la scapola e l'osso sacro.
- Mantiene il posizionamento terapeutico
- Promuove l'allineamento neutro del corpo
- Facilita la gestione di tubi e linee

Posizionatori Flo-Form per terapia intensiva neonatale

SleepAngel®

La tecnologia Flo-Form® permette ai nostri posizionatori neonatali di essere micro-conformati per le esigenze mediche uniche di ciascun paziente. Flo-Form aiuta anche a proteggere la pelle, a promuovere l'allineamento neutro del corpo e a favorire uno sviluppo più sano dei pazienti neonatali fragili.



Per il posizionamento della testa

- Ridistribuisce la pressione per proteggere la pelle
- Aiuta a ridurre la flessione laterale del cranio
- Favorisce l'allineamento neutro testa/tronco
- Facilita la gestione di tubi e linee
- Consigliato per l'uso su un singolo paziente



Per il posizionamento del corpo

- Crea un confine esterno morbido per sostenere una posizione flessa e mediana.
- Aiuta a mantenere l'allineamento neutro del corpo e le vie aeree positive
- Favorisce il normale sviluppo muscolo-scheletrico e neuromotorio
- Consigliato per l'uso su un singolo paziente

Flo-Form Combo tubo per TIN

SleepAngel®



Per posizione supina

Modellare il posizionatore intorno al perimetro esterno del corpo del bambino, facendo attenzione a evitare linee e tubi.



Per posizione prona

Realizzare la modellazione in posizione prona dai fianchi alla parte alta del capo. Comprimere il posizionatore sotto l'ombelico e le ginocchia e modellare il posizionatore più grande sul bambino. Modellare il posizionatore intorno al perimetro esterno del corpo del bambino, assicurandosi di evitare linee e tubi.



PASSO 1

Iniziare ad appiattire il posizionatore.



PASSO 2

Posizionare il bambino sul posizionatore e premere i bordi esterni del posizionatore per modellarlo lungo il perimetro del corpo.



PASSO 3

Avvolgere il tubo fluidizzato intorno al posizionatore, passando sotto eventuali linee o tubi. Utilizzare la cinghia in velcro per fissare entrambe le estremità del tubo.



PASSO 4

Premere il tubo fluidizzato per appiattirlo e creare la massima altezza lungo il perimetro.



PASSO 5

Ottenere un'ulteriore personalizzazione, modellando il dispositivo nella posizione desiderata.



PASSO 6

Se necessario, fissare con cinghie di sicurezza aggiuntive.

Flo-Form Corpo per TIN

SleepAngel®



Per posizione laterale

Modellare Flo-Form sul perimetro esterno del corpo del bambino, assicurandosi di evitare linee e tubi.



Per posizione prona

Realizzare la modellazione in posizione prona dai fianchi alla sommità del capo spingendo verso il basso con le dita lungo i lati del corpo. Comprimerne il posizionatore sotto l'ombelico e le ginocchia. Un piccolo posizionatore di servizio può essere usato direttamente sopra il posizionatore per il corpo intero come rotolo.



PASSO 1

Iniziare ad appiattare il posizionatore.



PASSO 2

Posizionare il bambino vicino all'estremità superiore del posizionatore e modellare Flo-Form intorno al bambino.



PASSO 3

Con la "mano della mamma" sul bambino, usare la mano opposta per modellare il lato esterno del posizionatore verso il bambino.



PASSO 4
6

Ripetere il punto 3, modellando il lato più vicino del posizionatore verso il bambino.



PASSO 5

Modellare la parte superiore del posizionatore dalla testa contro la mano.



PASSO 6

Modellare la parte inferiore del posizionatore dai piedi contro la mano e posizionare le cinghie di fissaggio dove necessario.

Flo-Form Gamma di prodotti

SleepAngel®

Nome	Codice	Nome tecnico	Misurare (cm)	Peso (g)	Riempimento
Flo-Form S	3015006	Posizionatore Flo-Form, Piccolo	19x27	312	Flo-Form
Flo-Form M	3015007	Posizionatore Flo-Form, Medio	24x38	710	Flo-Form
Flo-Form L	3015008	Posizionatore Flo-Form, Grande	48x63	3400	Flo-Form

Prevenzione efficace delle lesioni da pressione

I dispositivi di posizionamento fluidizzati si adattano tridimensionalmente alla forma specifica del paziente e la mantengono fino a quando non vengono rimodellati.

SleepAngel®



Flo-Form può essere modellato in qualsiasi forma e mantiene la sua forma fino a quando non viene rimodellato.

Flo-Form è un mezzo eccellente per il posizionamento del paziente e la redistribuzione della pressione. Il posizionatore include la tecnologia di filtraggio PneumaPure® per evitare la contaminazione incrociata.

Benefici dei prodotti Flo-Form

- Cura completa: Supporta la prevenzione delle lesioni da pressione, il controllo delle infezioni, la rotazione e il riposizionamento dei pazienti, garantendo un'assistenza più sicura ed efficace.
- Applicazioni versatili: Adatto per il posizionamento di adulti e neonati
- - Manutenzione sostenibile: Consente protocolli di pulizia e disinfezione efficienti, promuovendo l'igiene e riducendo il consumo di risorse.
- - Maggiore efficienza: Contribuisce a ridurre i giorni di degenza dei pazienti migliorando gli esiti e snellendo i processi di cura dei pazienti.

Flo-Form per il posizionamento di adulti e neonati:

- Posizionamento della testa
- Posizionamento del corpo
- Posizionamento durante lo sviluppo

Per la rotazione e il posizionamento laterale

- Migliora la sicurezza dell'operatore
- Mantiene il posizionamento terapeutico
- Consente la redistribuzione della pressione
- Promuove l'allineamento neutro del corpo
- Consente di girare e posizionare il paziente in modo personalizzato



Contact

SleepAngel Medical
produced by Gabriel Scientific

www.sleepangel-medical.com / www.incasmed.com

info@incasmed.com