

FLOWSAFE II EZ[®]

DISPOSABLE CPAP SYSTEM

SISTEMA CPAP CON NEBULIZZATORE INTEGRATO

Con il sistema Flow-Safe II EZ ora è possibile somministrare una terapia aerosol e CPAP con una sola fonte di ossigeno:

VANTAGGI

- **AEROSOL INTEGRATO**
Il Flow-Safe II EZ offre la possibilità di un nebulizzatore in linea usando una sola fonte di ossigeno. Meno parti, rapido assemblaggio.
- **CONSUMA IL 50% IN MENO DI OSSIGENO**
Il Flow-Safe II EZ risparmia ossigeno, pur garantendo un alto livello di erogazione di FiO₂. Risparmia risorse e rappresenta un importante vantaggio nei lunghi trasporti. Un incremento del flusso può essere necessario quando si attiva il nebulizzatore.
- **MANOMETRO E VALVOLA DI SICUREZZA**
Il sistema Flow-Safe II EZ include un manometro integrato per la lettura delle pressioni. Nessun montaggio di una apparecchiatura separata. La valvola di sicurezza si regola automaticamente per evitare una pressione eccessiva.
- **MASCHERA DAL DESIGN AVANZATO**
La maschera Flow-Safe II EZ è più leggera, facile da maneggiare ed è progettata per creare una migliore tenuta anatomica. L'imbragatura elastica per la testa è rapida da posizionare e grazie al velcro è facilmente regolabile per il comfort del paziente.
La maschera Flow-Safe II EZ include:
 - Clip a disconnessione rapida
 - Porta dritta rotante
 - Porte integrate sulla maschera
 - Morbida imbottitura frontale che si adatta facilmente riducendo la pressione sul naso.



FLOWSAFE II EZ[®]

DISPOSABLE CPAP SYSTEM



Nebulizzatore integrato



Manometro e valvola di sicurezza incorporati



Compatibile con le linee di campionamento per capnografi da 15/22 mm senza bisogno di

Linee guida campione per la preparazione del dosaggio RX D

IMPOSTAZIONE FLUSSIMETRO L/MIN	14 ~ 15				23 ~ 24											
PRESSIONE CPAP CMH ₂ O	4 ~ 5				9 ~ 10											
FLUSSO MASSIMO ATTRAVERSO EZFLOW	6 L/min				10 L/min											
RENDIMENTO	12 ml/ora				16 ml/ora											
RX (MG/ORA)	5	10	15	20	5	10	15	20								
Durata del trattamento (ore)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5
Medicazione @ 5mg/ml (ml)	1	2	2	4	3	6	4	8	1	1,5	2	3	3	4,5	4	6
Soluzione fisiologica (ml)*	11	22	10	20	9	18	8	16	15	22	14	21	13	20	12	18

* Arrotondato al ml successivo

ESEMPIO:

Per fornire 10 mg/ora di 5 mg/ml di medicazione a 10 l/min; 1,5 ore di durata: **Mettere 3 ml di medicazione + 21 ml di soluzione fisiologica** nel serbatoio del nebulizzatore e far funzionare per 1,5 ore.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
10-57318	<i>Flow-Safe II EZ sistema CPAP con maschera Deluxe misura Adulto Grande (Large) con porte, connessione con porta rotante diritta (porta di 22mm femmina), manometro, valvola di sicurezza, fissaggio per la testa comfort, tubo ossigeno 2 m e nebulizzatore EZFlow Max incorporato.</i>	5/box
10-57319	<i>Flow-Safe II EZ sistema CPAP con maschera Deluxe misura Adulto Piccolo (Medium) con porte, connessione con porta rotante diritta (porta di 22mm femmina), manometro, valvola di sicurezza, fissaggio per la testa comfort, tubo ossigeno 2 m e nebulizzatore EZFlow Max incorporato.</i>	5/box
10-57320	<i>Flow-Safe II EZ sistema CPAP con maschera Deluxe misura pediatrica (Small) con porte, connessione con porta rotante diritta (porta di 22mm femmina), manometro, valvola di sicurezza, fissaggio per la testa comfort, tubo ossigeno 2 m e nebulizzatore EZFlow Max incorporato.</i>	5/box

Tutti i sistemi Flow-Safe includono manometro, valvola di sicurezza e tubo ossigeno da 2 metri